

Ohrreinigung  
professionell. smart. sicher.

## W-LAN Verbindung

1

Verbinden Sie Ihr bebird mit Ihrem Smartphone

2

Öffnen Sie die APP und drücken START



## Anleitung

1

Scannen Sie den QR Code und installieren Sie die APP



## Austausch Zubehör

2


Öffnen Sie die APP und wählen dort C3 Pro aus


3

Schalten Sie Ihren Ohrenreiner an

Öffnen Sie die Fixierung mit einer Drehbewegung.  
Bringen Sie den Ohrlöffel ein.  
Fixieren Sie diesen wieder mittels Drehbewegung.

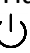

Halten Sie den  Button für 1sec. gedrückt

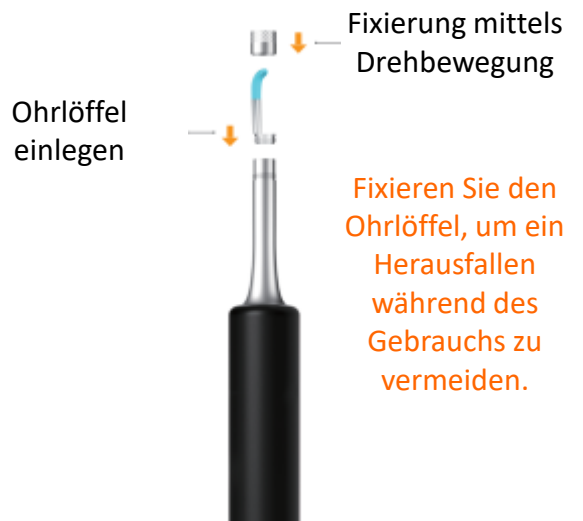

Fixieren Sie den Ohrlöffel, um ein Herausfallen während des Gebrauchs zu vermeiden.

## Zubehör

1



1x elastischer  
Ohrlöffel  
Weltneuheit: aus  
Kunststoff mit  
Silikon-  
Beschichtung

2



8x elastischer  
Ohrlöffel  
zur gründlichen  
Reinigung des  
Ohrkanals

## Produktdetails



## Gefahrstoffe

Komponente	Gefahrstoffe						
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)	
Elektronik	x	0	0	0	0	0	0
Gehäuse	0	0	0	0	0	0	0
Kunststoff- Zubehör	0	0	0	0	0	0	0

Marke	bebird
Produktbezeichnung	smarter Ohrreiniger
Typ	C3 Pro
Gewicht	21g
Netzwerk Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenne	interne FPC Antenne
Frequenz	2.4 Ghz
Bildübertragungsrate	30fps
Bildsensor	CMOS
Umgebungstemperatur	-10° bis 50°C
Batterie	250mAh Lithium
Akkulaufzeit	70min
Ladedauer	1h
Eingangsstrom	DC 5V 300mA
Außendurchmesser Linsenrohr	4.7mm
optimale Brennweite	1.5 – 2cm
Pixel	3M
Schwerkraftsensor	3 Achsen

## Hinweise

- 1 Reinigen Sie Ihren bebird mit alkoholischen Reinigungstüchern
- 2 Nutzen Sie Ihren bebird niemals, wenn Sie in Bewegung sind und achten Sie darauf, von niemandem berührt zu werden
- 3 Für Kinder < 1 Jahr ist bebird nicht geeignet
- 4 Zur Vermeidung von Verletzungen ist es Kindern nicht gestattet, bebird zu verwenden
- 5 Um Schäden vorzubeugen, vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten
- 6 bebird enthält eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Laden Sie Ihren bebird 1x monatlich im Falle einer unregelmäßigen Nutzung
- 7 Setzen Sie Ihren bebird nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, um Schäden am Gehäuse vorzubeugen
- 8 Während des Gebrauchs kann die Temperatur Ihres bebird leicht ansteigen (ca. 35°C) – lassen Sie Ihren bebird nach Gebrauch kurz abkühlen.
- 9 Kinder in sitzende Position bringen und bebird vorsichtig horizontal einführen

## FAQs

### ***Das Gerät reagiert nach dem Anschalten nicht.***

Drücken Sie ggf. mehrmals den POWER-Button für ca. 1 sec.

Laden Sie mit dem beigefügten Ladekabel zunächst den Akku – die Ladezeit beträgt 1h.

### ***Die Kamera schaltet sich nicht an.***

Schalten Sie das Gerät aus und wieder an.

### ***Die App schließt sich.***

Entfernen Sie die APP und installieren Sie diese erneut.

### ***Der Ladezustand des Geräts wird mit „ROT“ angezeigt***

Laden Sie mit dem beigefügten Ladekabel zunächst den Akku – die Ladezeit beträgt 1h.

### ***Trotz erfolgreicher Verbindung zwischen APP und Gerät zeigt sich kein live-Bild***


Trennen Sie die Verbindung mit dem W-LAN, starten Sie Ihren bebird erneut und verbinden Sie diesen noch einmal mit dem W-LAN.

### ***Die WLAN Verbindung ist nicht stabil und unterbricht kurzzeitig.***

Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder an und verbinden es erneut mit der bebird APP.

### ***Es werden 8 Ohrhörer im Zubehör angegeben...***

Es befinden sich 4 weitere Ohrhörer in der Kappe Ihres bebird.

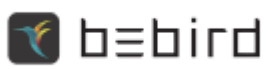

Heifeng Zhzao Technology Co. Ltd.  
Room 1205, Tongfang Center Building,  
Haoxiang road, Yin'er Community, Xinqiao  
subdistrict, Bao'an District,  
Shenzhen, China