



Medizinprodukt zur Pflege und Reinigung der äußeren Gehörgänge nach dem Baden, Duschen, Schwimmen und Tauchen.

Gebrauchsanleitung

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um den bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dolphiner™ vorschriftsmäßig angewendet werden.

Eigenschaften:

DOLPHINER™ Ohrenspray dient der Reinigung und der Pflege der äußeren Gehörgänge bei Kindern (ab 2. Lebensjahr) und Erwachsenen.

DOLPHINER™ unterstützt die Wiederherstellung des physiologischen pH-Wertes und des Säureschutzmantels der äußeren Gehörgänge.

DOLPHINER™ kann das Wachstum gefährlicher Bakterien, Pilze oder anderer entzündlicher Prozesse verhindern.

DOLPHINER™ sollte immer nach längerem Tragen von Ohrstöpseln, Kopfhörern oder Hörgeräten angewendet werden.

DOLPHINER™ ist empfohlen zur Anwendung vor und nach dem Schwimmen oder anderen Arten von Wassersport wie Tauchen, Windsurfen, Kitesurfing etc.

Hinweise zur Anwendung

Vor dem ersten Gebrauch, drücken Sie bitte den Applikator 2-3mal, um Luft aus dem System zu verdrängen. (Abb. 1)



Abb.1



Art der Anwendung

Empfohlen ist die Anwendung von 1-2 Sprühstößen für jedes Ohr vor und nach jedem Aufenthalt im Wasser oder nach entfernen eines Hörgerätes oder Ähnlichem. Vor der Verwendung sollte DOLPHINER™ kurz geschüttelt und einige Zeit in der Hand erwärmt werden. Halten Sie den Sprühkopf aufrecht und unmittelbar vor den Gehörgang.

Wichtig: Um Verletzungen zu vermeiden, sollte der Applikator nicht in den Gehörgang gesteckt werden. Nach dem Sprühvorgang ausfließende Flüssigkeit mit einem Tuch abwischen

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe von DOLPHINER.™

Warnhinweise:

- DOLPHINER™ stets verschlossen und für Kinder außerhalb der Reich- und Sichtweite aufbewahren
- Kontakt mit Mund und Augen vermeiden
- Bei Ohrenschmerzen unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
- Nicht anwenden bei perforiertem Trommelfell
- DOLPHINER™ ist entzündlich, nicht in eine offene Flamme sprühen

Zusätzliche Informationen:

DOLPHINER™ immer in einer aufrechten Position und nicht über 25°C lagern

DOLPHINER™ ist ausschließlich zur persönlichen Anwendung gedacht

DOLPHINER™ nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatum verwenden

DOLPHINER™ innerhalb von 3 Monaten nach Öffnen der Packung verwenden

DOLPHINER™ ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der europäischen Richtlinie 93/42EWG

Bestandteile: Isopropylalkohol, Glycerin, Essigsäure, Pfefferminzöl

Packungsgröße: Glasfläschchen mit 15ml Inhalt

Hersteller:

Axpham Ltd.
ul. Koziatulski 36
85-657 Bydgoszcz

Vertrieb (D, A, CH):

Biobridge Europe GmbH
Zu den Eichen 5
D-16727 Oberkrämer, Deutschland