

Voskolix Ohrenspray

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Medizinprodukt ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um den bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Voskolix Ohrenspray** vorschriftsmäßig angewendet werden.

Eigenschaften:

Voskolix Ohrenspray dient der Reinigung und Pflege der äußeren Gehörgänge bei Erwachsenen und Kindern ab dem 2. Lebensjahr.

Voskolix Ohrenspray dient der Aufweichung und natürlichen Entfernung von überschüssigem oder verstopfendem Cerumen (Ohrenschmalz).

Voskolix Ohrenspray verhindert die Notwendigkeit des Ausspülens.

Hinweise zur Anwendung:

Vor Gebrauch die Flasche kurze Zeit in der Hand erwärmen und gut schütteln.

Bitte betätigen Sie anschließend 3-4x den Sprühknopf bis er sprüht. Den Sprühknopf vom Körper weg halten. (Abb. 1)



Abb.1

Art der Anwendung:

- **Voskolix Ohrenspray** kann im Stehen oder aufrechtem Sitzen angewendet werden. Halten Sie die Flasche aufrecht und platzieren Sie die Sprühkopfföfnung in dem Gehörgang.
- Drücken Sie den Sprühknopf 1x2 vollständig nach unten.
- Vorsichtig den Tragus (Knorpel vor dem Gehörgang) massieren.
- Falls notwendig, den kompletten Vorgang für das andere Ohr wiederholen.
- Der Sprühknopf kann abgenommen und nach Gebrauch unter heißem Wasser abgespült werden. Danach wieder aufsetzen.

Dosierung

- **Voskolix Ohrenspray** sollte 1-2x pro Woche angewandt werden, um einer Cerumbildung vorzubeugen und den Selbstreinigungsprozess des Ohres zu unterstützen.
- Vor einer Ohruntersuchung bei Arzt können 1-2 Sprühstöße 2x täglich über einen Zeitraum von 4-5 Tagen angewandt werden.

Gegenanzeigen

- Überempfindlichkeit gegen den Inhaltsstoff von Voskolix Ohrenspray.
- Patienten mit einem perforiertem Trommelfell oder Ohrenschmerzen dürfen das Produkt nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

- **Nebenwirkungen:**

Das in **Voskolix Ohrenspray** verwendete Olivenöl in pharmazeutischer Qualität enthält keine Aroma-, Schlacken-, oder Farbstoffe.

- Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Zusätzliche Informationen:

Voskolix Ohrenspray ist ausschließlich nur jeweils für eine Person gedacht.

Voskolix Ohrenspray stets verschlossen und für Kinder außerhalb der Reich- und Sichtweite unzugänglich aufbewahren.

Voskolix Ohrenspray stehend und bei Raumtemperatur (nicht über 30°C) lagern.

Voskolix Ohrenspray kann bis 3 Monate nach Anbruch verwendet werden, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus.

Voskolix Ohrenspray ist für den Gebrauch im Gehörgang vorgesehen. Nicht in die Nähe von Augen, Nase oder Mund sprühen.

Voskolix Ohrenspray ist ein Medizinprodukt Klasse I entsprechend der EU Richtlinie 93/42 CEE

Bestandteile: Olivenöl in pharmazeutischer Qualität

Packungsgröße: Glasfläschchen mit 15ml Inhalt

Hersteller:

Axpham Ltd.
ul. Koziatulski 36
85-657 Bydgoszcz
Polen

Vertrieb (D, A, CH):

Biobridge Europe GmbH
Zu den Eichen 5
D-16727 Oberkrämer, Deutschland

